

# TENA LADY PANTS PLUS CREME (Krém színű) PELENKANADRÁG – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A TENA Lady Pants Plus Creme (Krém színű) pelenkanadrág gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz.

**A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

A TENA Lady Pants Plus Creme (Krém színű) pelenkanadrág diszkrét és biztonságos védelmet jelent vizelettartási probléma esetére.

A hármas védelem garantálja, hogy vizeletvesztés esetén a szivárgás, a kellemetlen szagok és a nedvesség is hamar eltűnjön.


Termékválasztásnál figyeljen arra, hogy vizeletvesztés súlyosságának megfelelő terméket válassza.

Bontsa fel a csomagolást, majd vegye ki a terméket.

1. Vegye fel a terméket úgy, mint egy hagyományos fehérneműt.
2. Levételkor tépje fel az oldalvarrást.
3. Tekerje össze a használt terméket.
4. Dobja a háztartási hulladékba a fehérnemű-pelenkanadrágot.  
Ne dobja a toalettbe!

A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja.

A termék gyermekektől távol tartandó. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a termékkel vagy a csomagolással játszani.

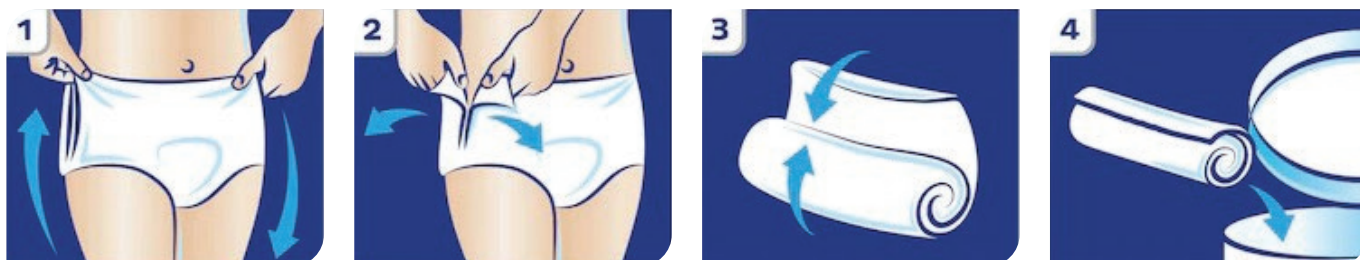

Dermatológiailag  
tesztelt



Parfüm-  
mentes



[www.tenalady.hu](http://www.tenalady.hu)

Essity Hungary Kft.  
1021 Budapest, Budakeszi út 51.  
INKO-INFO: 06-80-20-10-20  
(ingyenesen hívható zöldszám)

 **essity**