

TENA LADY TISZTASÁGI BETÉT MÉRETŰ INKONTINENCIABETÉT – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékek:

- TENA Lady Slim Micro
- TENA Lady Slim Mini Magic
- TENA Lady Slim Ultra Mini
- TENA Lady Slim Ultra Mini Plus

A TENA Lady tisztasági betét méretű inkontinenciabetétek gyógyászati segédeszközök.

A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A TENA Lady betétek diszkrét és biztonságos védelmet jelentenek vizelettartási probléma esetére. A hármas védelem garantálja, hogy vizeletvesztés esetén a szivárgás, a kellemetlen szagok és a nedvesség is hamar eltűnjön.

Termékválasztásnál figyeljen arra, hogy vizeletvesztés súlyosságának megfelelő terméket válassza. Bontsa fel a csomagolást, vegye ki a terméket, majd húzza le a ragasztószalagot.

Helyezze a betétet ragasztócsíkkal lefelé az alsóneműjébe, és bizonyosodjon meg róla, hogy stabilan rögzült.

A használt terméket ne dobja a toalettbe, kezelje a háztartási hulladékkal együtt!

A termék csomagolását, valamint az öntapadó felület ragasztószalagját a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja. A termék gyermekektől távol tartandó.



Dermatológiailag
tesztelt



Parfüm-
mentes



www.tenalady.hu

Essity Hungary Kft.

1021 Budapest, Budakeszi út 51.

INKO-INFO: 06-80-20-10-20

(ingyenesen hívható zöldszám)

essity