

TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TENA *Comfort* Mini Plus



Az **enyhe / középsúlyos női vizeletinkontinencia eszközös ellátása** alapvető a társas működéseket blokkoló tünetek **1. vonalbeli kezelésben**. (EMMI irányelv). A vizeletfelszívók önálló és kombinált alkalmazása segíthet a vizeletinkontinencia tüneteinek stabilizálásában, ezáltal a nőbetegek családi és kereseti szerepköreinek megóvásában. (<https://academic.oup.com/ocmed/article/55/7/552/1422072>)

A **TENA *Comfort* Mini** termékcsaládba tartozó **termékváltozatok** kimondottan az enyhe - középsúlyos női vizeletinkontinencia tüneti ellátására tervezett - **komfortos** és ergonomikus felhasználású – **speciális gyógyászati segédeszközök**. Alkalmazásuk az önálló tüneti kezelésben igen előnyös, segítségükkel a szokásos mindennapi női életvitel visszaállítható és fenntartható, rendszeres és megfelelő használatuk biztonságérzetet, diszkréciót kölcsönöz az érintett hölgyek számára. Magyarországon a **TENA *Comfort* Mini** termékcsalád 3 - méretarányosan növekvő - vizeletfelszívó képességű **termékváltozata** érhető el: **Plus**-legkisebb, **Extra-közepes**, **Super** - legnagyobb.

A **TENA *Comfort* Mini Plus** nedvszívó kapacitása **381 ml**, a hölgyek testi, pszichés és társas mivoltából adódóknak kiegyensúlyozott és jó megfelelését adó anatómiailag formázott, magas effektív teljesítményű női-inkontinencia betét. A **termék külleme**, mérete és konkrét használati módja is nagyban hasonlít a közönséges higiénés női betétekhez. Diszkrét megjelenése az aktív női életvitellel összeegyeztethető használatot tesz lehetővé. **Külső és belső szerkezete**, anyagösszetétele védelmet nyújt a vizeletinkontinenciában szokványos kellemetlen és zavaró – túlsordulásos, illesztési hiba eredetű, stb. - **vizeletszivárgás és szagok ellen**. Utóbbit - a baktériumszaporodás kémiai gátlásával - a termékcsalád speciális **Odour Control®** rendszere is támogatja.


A termék összességében a rendszeres és tartós önálló alkalmazással együtt járó szakmai és betegoldali igényeknek kiemelkedő megfelelését nyújtó, viszonylag kis

méretéhez képest is meggyőző nedvszívó és folyadékmegkötő teljesítményű, korszerű női-inkontinenciabetét. Használata a biztonságos, ergonomikus és komfortos mindennapi felhasználás egyedi kombinációját nyújtja a betegek számára.



A TENA Comfort Mini Plus főbb szerkezeti és funkcionális jellemzői:

- 1. Anatómiai formázottság:** A nő test jellegzetességeinek megfelelő kialakítása optimális illeszkedést biztosít, a komfortos, biztonságos és diszkrét használat érdekében.
- 2. Nemszőtt textil fedőréteg:** A speciális felsőborítás a napi használatban a termék a testtel közvetlenül érintkező része alatti bőrterület légzését segíti. Szálszerkezete kényelmes, mechanikai és kémiai irritáció-mentes viseletet biztosít, a mikrobolyhos kialakítás a hasznos vizeletfelvevő felületet többszörösére növeli.
- 3. Puha oldalgumírozás:** a betét kényelmes és stabil illeszkedését szimmetrikus puha oldalgumírozás biztosítja az ágyéki-comb területen. Ez a szivárgásos balesetek megelőzését - egyfajta izolációt teremtve - is támogatja az oldalirányú folyadékkúszással szemben. Segíti a vizelet gyors összegyűjtését és elvezetését.
- 4. Dupla cellulóz mag:** A nedvszívó felszínhez közvetlenül kapcsolódó külső cellulózmag az oda érkező vizeletet tölcser-szerűen gyűjti össze és azonnal a belső vizeletmegkötő mag felé vezeti az kapillárisai révén. Utóbbi a tartalmazza szuperabszorbens anyagot, ami a vizeletet már olyan erővel zárja magába, hogy az a napközbeni testmozgás (pl.: séta – hajlógatás – felállás - leülés) vagy a tartósabb ülés (pl. tömegközlekedés, iroda, stb.) nyomásviszonyai mellett sem szivároghat vissza.
- 5. Szagsemlegesítő (Odour Control®) rendszer:** A szuperabszorbens mag anyagösszetétele enyhén savas - bőrbarát kémhatású - közeget tart fenn, ami a szabad ammónia felhalmozódását és az ezért felelős baktériumok szaporodását is gátolja, ill. a keletkezett ammónia elbomlását segíti. Így a jellegzetesen intenzív és kellemetlen – szalmiák - szúrós szag kialakulását több irányból is fékezi.
- 6. Vízhatlan külső borítás:** A betét alsónemű felé eső oldalát speciális - mikroperforált fólia – borítás fedi. Ez blokkolja vizelet szivárgást a ruházat felé és segíti az optimális ventilációs páracontrollt.
- 7. Fixáló rendszer:** a betét egyszerűen pozícionálható a női fehérneműbe a külső borításon található – és a ruházatot nem károsító – öntapadó felület segítségével. A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása után a termék könnyen és erősen rögzíthető a női alsónemű szabad textil felületéhez. Napközben stabilan a helyén marad, akkor is ha a betétbe már nagyobb mennyiségű vizelet jutott.

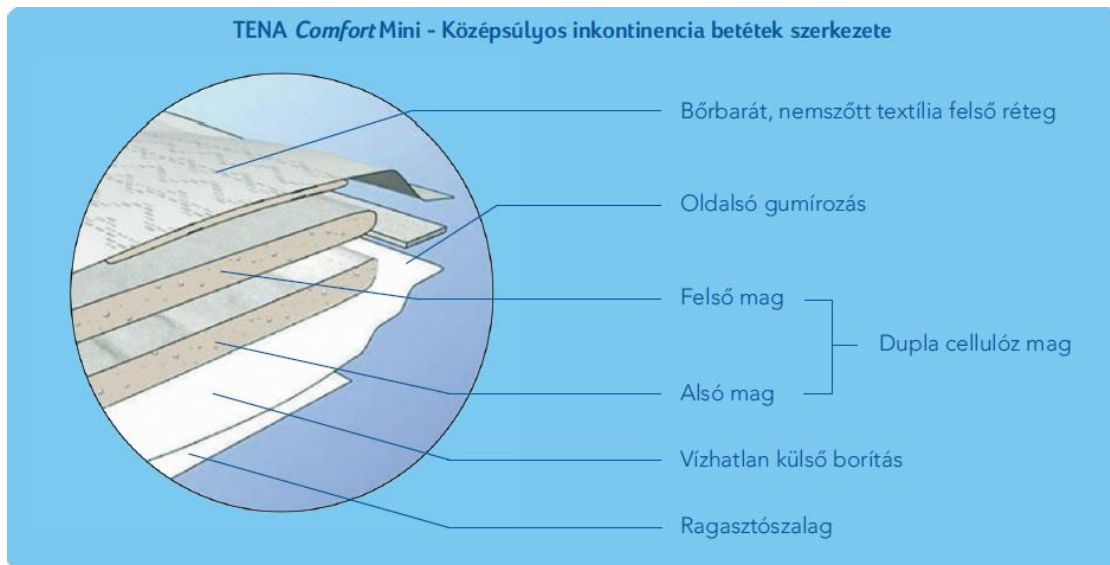

A TENA *Comfort Mini* betétek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek. A TENA *Comfort Mini* termékeket előállító, Essity Hygiene and Health AB gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítással rendelkeznek. A TENA *Comfort Mini Plus*, *Extra* és *Super* betétek ajánlott napi felhasználása 3 db/nap. A termékek kiváló minőségének köszönhetően az ajánlott napi felhasználási mennyiség gazdaságos megoldást jelent a felhasználó számára. A termékek szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

A TENA *Comfort Mini* betét cseréjét szükség szerint végezzük a következő módon:

1. Távolítsuk el a használt, cseréire szoruló inkontinencia betétet a fehérneműből.
2. Tisztítsa és ápolja a bőrt TENA Bőrpoló termékekkel.
3. Hajtogassuk szét a betétet, majd távolítsuk el a kék színű felirattal ellátott ragasztószalagot, annak felületén jelzett módon.
4. Az inkontinencia betétet a tisztasági betétekhez hasonlóan, ragasztószalagos felével a fehérnemű lábközi részére, középre rögzítsük. Férfi páciensek esetén a lábközi részre, kissé előre helyezzük.
5. Használjunk testhezálló fehérneműt a vizelet kifolyásának elkerülése érdekében.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek tudja bejelenteni az amd.vig@ogyei.gov.hu címen.

Gyártja és forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
További információk: www.tena.hu, INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Használati útmutató 2022.06. 02..

Gyártó: Essity Hygiene and Health AB
SE-405 03 Göteborg,
Sweden

Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.