

TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TENA Men Level 2 – egyszerhasználatos hímvesszőpelenka

Az **egyszerhasználatos hímvesszőpelenkák** rutinszerű alkalmazása segítséget nyújt a **férfi vizeletinkontinencia** tüneteinek kezelésében, így - adott esetben - az **érintettek** társas, családi és kereseti szerepkörének megóvásában is¹.

A **TENA Men hímvesszőpelenkák** olyan **gyógyászati segédeszközök** melyeket kimondottan a **férfi vizeletinkontinencia** tüneteinek ellátására fejlesztettek ki.

A **normál férfi alsóneműbe** rögzített, elegendően nagy nedvszívású – helyesen megválasztott *TENA Men termékváltozat* alkalmazása révén a vizeletinkontinencia olyan árulkodó jelei, mint az öltözéken megjelenő nedves foltok, vagy a jellegzetes vizelet szag egyszerűen kivédhetők.

TENA Men termékváltozatok formája lényegileg eltér a különféle női betétektől és a felnőtt (inkontinencia) pelenkanadrágok – nadrágpelenkák esetén megszokottól egyaránt. Speciális - anatómiai - formázottságuk és a **férfi életvitelhez idomuló használati módjuk a vizeletinkontinencia önálló és diszkrét kezelési lehetőségét teremti meg az érintettek számára.**

A *TENA Men termékváltozatok* a normál **férfi alsóruházat hétköznapi kiegészítéseként működnek.** A termékcsalád használatával elérhető előnyöknek a **férfi lét - anatómiai, pszichoszociális és életviteli** – sajátosságai alapján felépülő gyártástechnológia és az ebből adódó termékteljesítmény, valamint a megfelelő beteggyüttműködés együttesen adja az alapját. A mindennapok szintjén mindez azt jelenti, hogy a terméket rendeltetésszerűen használó **férfiak alig, vagy csak minimális mértékben kell változtassanak addigi öltözködési és életviteli szokásaikon,** miközben vizeletvesztéses panaszaikra is megoldást találnak. A kezelésnek ezt a módját elfogadó betegeknél a jól (urológus, vagy más szakorvos segítségével) megválasztott termék (kellő begyakorlás utáni) mindennapos használatával a tünetek egyszerűen palástolhatók.

Társadalombiztosítási támogatással hazánkban *3 különböző TENA Men termékváltozat* érhető el. Ezek közül **450 ml nedvszívó kapacitást a TENA Men Level 2** nyújt, ami az **enyhe és a közepes súlyos férfi vizeletinkontinencia** tüneti kezeléséhez ajánlható. A TENA Men „1” termékváltozat mérete és nedvszívókapacitása rendre kisebb, megjelenése ezzel arányban diszkrétebb, míg a TENA Men „3” kapacitása már kiemelkedően nagy, 700 ml feletti, így a probléma súlyosbodásával van lehetőség nagyobb kapacitású eszközre váltani. A TENA Men „1” termékváltozat az enyhébb férfi vizeletinkontinencia kezelésére használatos.

A TENA Men Level 2 – megfelelően elsajátított és kivitelezett eszközhasználat mellett – az addigi, aktív és férfias életvitel szinte törésmentes folytatását teszi lehetővé enyhe vagy közepes súlyos vizeletinkontinencia esetén is. Ezt a termék **precíz anatómiai megformáltsága, 450 ml nedvszívása, diszkrét dizájnja, fajlagosan rendkívül kis mérete, és egyesével csomagolt kialakítása** együttesen teszik lehetővé. Az innovatív rész megoldások sorából kiemelendő a termék speciális **Odour Control®** rendszere, ami a jellegzetes vizeletszagért felelős ammóniaképző baktériumok szaporodását fékezi, míg a **termék egyéb műszaki megoldásai a szivárgások blokkolásáért felelnek,** akár a felszívott folyadékról, akár az

„elzsilipelendő” szagokról legyen is szó.

1: Moore KC, Lucas MG. Management of male urinary incontinence. *Indian J Urol.* 2010;26(2):236–244. doi:10.4103/0970-1591.653982:

AZ ESZKÖZ FŐBB SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐI: A TENA Men Level 2 olyan speciális hímveszőpelenka ami a **magas nedvszívó teljesítményt** a teljesen **diszkrét használat** (fajlagos kis méret, egyenkénti csomagolás, modern-férfias design) lehetőségének megtartása mellett nyújtja. **Rutinszerű alkalmazása** ergonomikus és biztonságos az **önellátásra képes, enyhe-középsúlyos** vizeletinkontinens férfi betegek korszerű kezelésében is. Használata különösen előnyös lehet a már határozottabb tüneteket mutató, de **a nadrágpelenka alkalmazásától** (pl. önérzeti, szubjektív okból) határozottan elzárkózó **vizeletinkontinens férfiak számára**.²

- **Anatómiai formázottság:** férfi test adottságainak megfelelő illeszkedést biztosítja a kényelmes, biztonságos és diszkrét – a felsőruházat megjelenését nem / alig befolyásoló - használat érdekében.
- **Nemszőtt-textil fedőréteg:** A testtel közvetlenül érintkező felület a bőr légzését segíti, irritációmentes viseletet biztosít, a puha - mikrobolyhos - felszín növeli a vizeletfelvevő felületet.
- **Oldalgumírozás:** a kényelmes és stabil illeszkedést a kétoldali puha-oldalgumírozás biztosítja az ágyék-comb áthajlásban. Ez az oldalirányú folyadékkiáramlást is gátolja és a szagokat is izolálja.
- **Dupla cellulóz – nedvszívó - mag:** A külső cellulózmag a vizeletet összegyűjti és kapillárisaival azonnal a belső mag felé vezeti. A belső mag tartalmazza a – növelt mennyiségű – szuperabszorbenst, az így megkötött, (belső cellulóz-magba zárt) vizelet nem szívárog vissza.
- **Szagsemlegesítő (Odour Control®) rendszer:** A belső cellulóz-mag szuperabszorbens összetevője a jellegzetes vizeletszagért felelős ammónia felszabadulását két irányból is gátolja. Egyrészt aktívan elősegíti az ammónia bomlását, másrészt fékezi az ammóniát termelő baktériumok szaporodását.
- **Microperforált borítás:** A hímveszőpelenka külső oldalát mikroperforált borítás fedi. Ez blokkolja a vizelet átszivárgását a ruházat irányába, miközben lehetővé teszi a bőr normál légzését.
- **Rögzítő elemek:** A ragasztó-védőfólia eltávolítása után a terméken található öntapadó csík segítségével a hímveszőpelenka könnyen és stabilan fixálható. A száraz férfi alsóneműbe így rögzített hímveszőpelenka napközben is a helyén marad, a vizeletvesztés mértékétől függetlenül.

2.: www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2312/fajlok/EEM_szakmai_iranyelve.pdf

A TENA Men Level 2 termék használata ajánlott:

Enyhe-középsúlyos vizeletvesztés esetén az egyébként mozgásában önálló, részlegesen korlátozott és ágyban fekvő betegeknek egyaránt ajánlható. Férfiak számára lett kifejlesztve, prosztata betegségek, műtétek következtében kialakult inkontinencia fennállásakor is javasolható a használata.



TENA Men Level 2 – Enyhe- és közepsúlyos inkontinencia betét



Hármas védelem a szivárgás, a kellemetlen szagok és a nedvesség ellen



A férfitest anatómiáját követő fészek forma, amely pontos illeszkedést tesz lehetővé



Vékony és diszkrét



Egyesével csomagolt, fenntartható csomagolóanyagban



Informatív lehúzócsík a ragasztásról

A TENA Men Level 2. **anatómiailag formázott**, a férfi genitáliákhoz illeszkedő betét. A belső, lágy textíli felület különleges komfortérzést nyújt, teljes mértékben **bőrbarát**. A vizelet felszívását cellulóz alapanyagú **nedvszívó réteg** biztosítja. A betét belsejében lévő poliacrilát alapú szuperabszorbens megköti a folyadékot, így a betét felülete száraz marad. A TENA Men Level 2 **légáteresztő külső borítása** biztosítja a bőrbarát, kényelmes viseletet.

A termék a fehérenműbe illeszthető, **biztonságosan rögzíthető**, ezáltal kényelmesen és észrevétlenül viselhető. A betétek **egyesével csomagoltak**, így higiénikusan, diszkréten kezelhetők és szállíthatók.

A biztonság-és komfortérzet az enyhe és közepsúlyos inkontinenciában szenvedő, de egyébként aktív ember számára visszaadja a lehetőséget a társadalmi életben, a munkában való tevékeny részvételre – ez jelentősen javítja mind az érintett, mind a környezete életminőségét.

A TENA Men Level 2 betét CE minősítéssel rendelkezik az európai szabványnak megfelelően. A terméket előállító, Essity Hygiene and Health AB gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítással rendelkeznek. A termék szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.

TENA Men Level 2 termék nedvszívó kapacitása: 450 ml


Alapanyag százalékos összetétele:

Cellulóz (49,12%), Szuperabszorbens (30,38%), Borítóanyag (PE, nemszőtt textília) (4,69%), Egyéb (Ragasztóanyag, rögzítő szalagok, elastikus szálak: 15,80%)

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

TENA Men

1. Az elhasznált terméket távolítsa el. Nyissa ki a TENA Men betét csomagolását, vegye ki és hajtsa szét a betétet.
2. Tisztítsa és ápolja a bőrt TENA Bőrápoló termékekkel.
3. Helyezze a genitáliákat a betétbe.
4. Húzza le a papírsíkot a ragasztóbevonatról. Ügyeljen arra, hogy a betét szélesebb része felül helyezkedjen el.
5. Helyezze a betétet a fehérműbe úgy, hogy a ragasztócsík az alsónadrág elülső részéhez illeszkedjen. A terméket simítsa kényelmesre, gyűrődésmentesre. Használjunk testhezálló alsónadrágot a vizelet kifolyásának elkerülése érdekében.

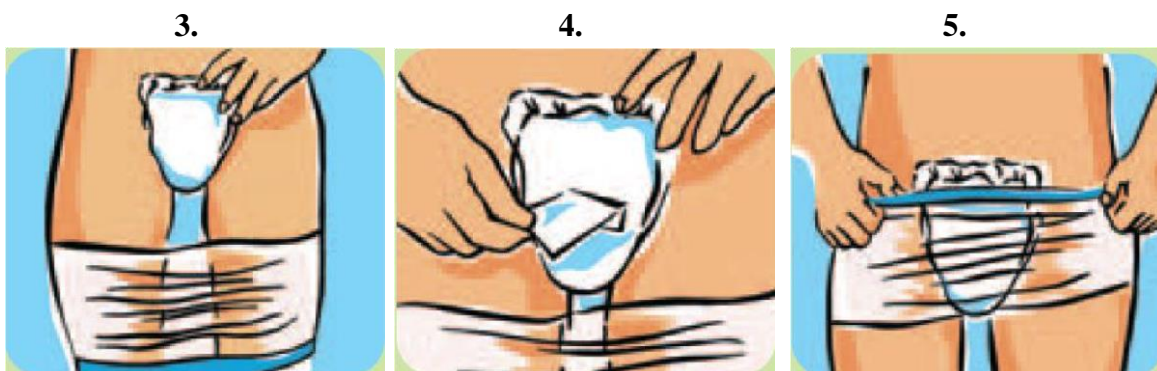

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek tudja bejelenteni az amd.vig@ogyei.gov.hu címen.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

További információk: www.tena.hu, INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Gyártó: Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden)

Használati útmutató 2023. 05.09.