

## TENA MEN LEVEL 4 PELENKANADRÁG – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


**A TENA MEN Level 4 pelenkanadrág gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz.**

**A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

Termékválasztásnál figyeljen arra, hogy vizeletvesztés súlyosságának megfelelő terméket válassza. Bontsa fel a csomagolást, majd vegye ki a terméket.

1. Vegye fel a terméket úgy, mint egy hagyományos fehérneműt.
2. Levételkor tépje fel az oldalvarrást.
3. Tekerje össze a használt terméket.
4. Dobja a háztartási hulladékba a fehérnemű-pelenkanadrágot.  
Ne dobja a toalettbe!

A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja. A termék gyermekektől távol tartandó. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a termékkel vagy a csomagolással játszani.

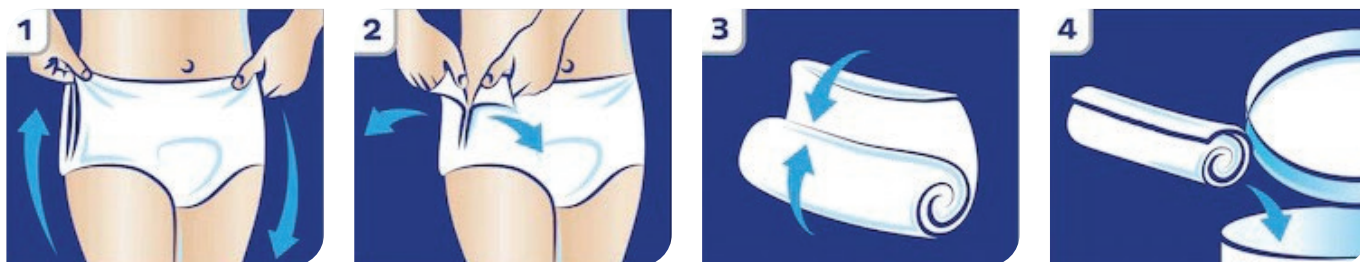

Dermatológiailag  
tesztelt



Parfüm-  
mentes



[www.tena.hu](http://www.tena.hu)

Forgalmazó:

**Essity Hungary Kft.**

1021 Budapest, Budakeszi út 51.

INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Gyártó:

**Essity Hygiene and Health AB**

SE-405 03 Göteborg, Sweden