

## TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### TENA *Pants* Normal



A **súlyos vizelet inkontinencia eszközös ellátása** alapvető a társas működéseket blokkoló tünetek **1. vonalbeli kezelésében**. (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról.) A vizeletfelszívók önálló és kombinált alkalmazása segíthet a vizeletinkontinencia tüneteinek stabilizálásában, ezáltal a betegek családi és kereseti szerepköreinek megóvásában.

A TENA *Pants* termékcsaládba tartozó **termékváltozatok** kimondottan a **középsúlyos és súlyos** vizeletinkontinencia és széklet inkontinencia tüneti ellátására tervezett – **komfortos, nagy nedvszívó képességű** és ergonomikus felhasználású – **speciális gyógyászati segédeszközök és egyben orvostechikai eszközök**, amelyeket egyszeri felhasználásra szántak.

A TENA *Pants Normal* a betegek testi, pszichés és társas mivoltából adódóan kiegyensúlyozott és jó megfelelését adó anatómiailag formázott, magas effektív teljesítményű inkontinencia fehérnemű típusú pelenkanadrág. **Külső és belső szerkezete**, anyagösszetétele védelmet nyújt a vizeletinkontinenciában szokványos kellemetlen és zavaró – túlcordulásos, illesztési hiba eredetű, stb. - **vizeletszivárgás és szagok ellen**.

A termék szakmai és betegoldali igényeknek kiemelkedő megfelelését nyújtó, kiváló nedvszívó és folyadékmegkötő teljesítményű inkontinencia fehérnemű típusú pelenkanadrág. A TENA Pants fehérneműhöz hasonló nadrágpelenkák a különböző típusú (középsúlyos, súlyos, vizelet és széklet inkontinens) betegnek biztonságos, prémium megoldást nyújtanak. Használata a biztonságos, ergonomikus és komfortos mindennapi felhasználás egyedi kombinációját nyújtja a betegek számára.

## A TENA *Pants* Normal inkontinencia pelenkák főbb szerkezeti és funkcionális jellemzői:

- 1) **Bőrbarát textilszerű felső réteg:** A vizeletet a nedvszívó rétegbe vezeti, és szárazon tartja a bőrt.
- 2) **Légáteresztő külső borítás:** Bőrbarát, mivel hagyja lélegezni a bőrt, így elkerülhetőek a bőrirritációk.
- 3) **Dupla cellulóz mag:** A felső mag a beérkező folyadékot gyorsan elvezeti, az alsó mag biztonságosan megtartja.
- 4) **Feel Dry™ réteg:** Elősegíti a gyors folyadék-elvezetést, ezáltal szárazon tartja a pelenka bőrrel érintkező felületét, így óvja a bőrt a nedvességtől.
- 5) **Körkörös derékgumírozás és hosszanti vízhatlan védőgát:** Szivárgásmentességet, kényelmes viseletet biztosítanak.
- 6) **Body-Close Fit™:** Pontos illeszkedést és diszkrét viseletet biztosít a testhezálló forma.
- 7) **Méret jelölése a terméken:** A termék a csomagolásból kivéve is könnyen beazonosítható.
- 8) **Szagsemlegesítő rendszer:** Savas pH-jának köszönhetően meggátolja a baktériumok szaporodását, ezáltal a kellemetlen szagok kialakulását.
- 9) **Anatómiailag formázott:** A test anatómiájának megfelelően kialakított pelenka forma jó illeszkedést biztosít, így biztonságot és kényelemérzetet nyújt.



A TENA *Pants* termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek. A termék gyártója, Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden) gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A termékek szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év. A TENA *Pants* Normal termék S, M, L méretben kapható.

Tárolási feltételek: szobahőmérsékleten, száraz körülmények között tárolandó

Az eszköz egyszeri használatra szánt

**Alapanyag százalékos összetétele:**

Cellulóz (62,05%), Szuperabszorbens (22,48%), Borítóanyag (PE, nemszőtt textília) (9,06%),  
Egyéb (Ragasztóanyag, rögzítő szalagok, elasztikus szálak: 6,41%)


## FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

### TENA *Pants*

A TENA *Pants* egyszerhasználatos termék. Fehérneműhöz hasonló kialakítása révén könnyen felhelyezhető minden testhelyzetben.

*Felhelyezés:* A nadrág rugalmas gumírozásának köszönhetően felhúzható, mint egy alsónemű.

1. Az elhasznált terméket távolítsa el, tisztítsa és ápolja a bőrt bőrpoló termékekkel.
2. Nyissa ki a TENA *Pants* csomagolását, vegye ki és hajtsa szét a pelenkanadrágot.
3. Kezeinket a derékrészbe bújtatva a gumírozott részeket szélteben kicsit nyújtsuk meg, hogy lazábbá válhassanak.
4. Tartsuk a terméket magunk elé úgy, hogy a lábkivágás keskenyebb része kerüljön előre.
5. A terméket magunk elé tartva helyezzük be az egyik majd a másik lábat a lábkivágásokba.
6. Húzzuk fel a terméket, úgy, mint egy alsóneműt, a láb közti részt igazítsuk el, hogy kényelmes viseletet érjünk el.

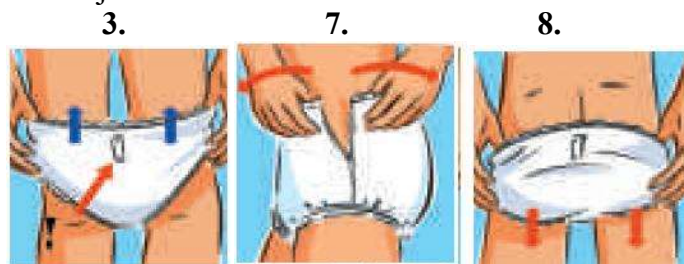

*Levétel:*

1. Tépje fel a nadrág két oldalán az illesztéseket és egy határozott mozdulattal húzza ki a lábak közül.
2. Eltávolítás után a pelenkát hajtsa össze és a terméken található ragasztószalag segítségével rögzítse, majd dobja ki.
3. A megbízható bőrvédő hatás elérése érdekében javasoljuk a TENA Bőrpolók használatát a következő termék felhelyezése előtt.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek tudja bejelenteni az [amd.vig@ogyei.gov.hu](mailto:amd.vig@ogyei.gov.hu) címen valamint a gyártónak: Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden) vagy a forgalmazónak az alábbi elérhetőségeken.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. További információk: [www.tena.hu](http://www.tena.hu), INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Használati útmutató lezárásának dátuma 2022.07.19.