

TENA PANTS PELENKANADRÁGOK – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékek:


- TENA Pants Normal 10 db
- TENA Pants Extra
- TENA Pants Plus
- TENA Pants Super

**A TENA Pants pelenkanadrágok gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök.
A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

Termékválasztásnál figyeljen arra, hogy vizeletvesztés súlyosságának megfelelő terméket válassza.
Bontsa fel a csomagolást, majd vegye ki a terméket.

1. Vegye fel a terméket úgy, mint egy hagyományos fehérneműt.
2. Levételkor tépje fel az oldalvarrást.
3. Tekerje össze a használt terméket.
4. Dobja a háztartási hulladékba a fehérnemű-pelenkanadrágot.
Ne dobja a toalettbe!

A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja.
A termék gyermekektől távol tartandó. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a termékkel vagy a csomagolással játszani.

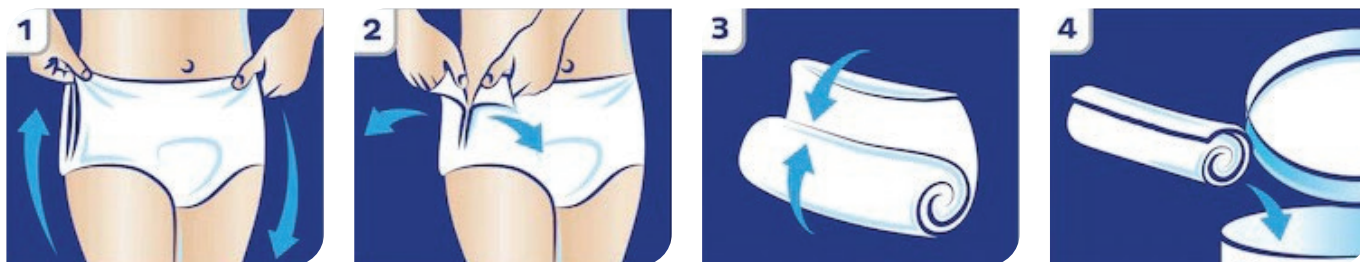

Dermatológiailag
tesztelt



Parfüm-
mentes



www.tena.hu

Forgalmazó:

Essity Hungary Kft.

1021 Budapest, Budakeszi út 51.

INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Gyártó:

Essity Hygiene and Health AB

SE-405 03 Göteborg, Sweden

essity