

TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TENA *Pants* Plus



A **súlyos vizeletinkontinencia eszközös ellátása** alapvető a társas működéseket blokkoló tünetek **1. vonalbeli kezelésében**. (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról.) A vizeletfelszívók önálló és kombinált alkalmazása segíthet a vizeletinkontinencia tüneteinek stabilizálásában, ezáltal a betegek családi és kereseti szerepköreinek megóvásában.

A **TENA *Pants*** termékcsaládba tartozó **termékváltozatok** kimondottan a **középsúlyos és súlyos** vizeletinkontinencia tüneti ellátására tervezett - **komfortos** és ergonomikus felhasználású – **speciális gyógyászati segédeszközök és egyben orvostechikai eszközök**, amelyeket egyszeri felhasználásra szántak. Alkalmazásuk az önálló tüneti kezelésben igen előnyös, segítségükkel a szokásos mindennapi életvitel visszaállítható és fenntartható, rendszeres és megfelelő használatuk **önállóságot**, biztonságérzetet, diszkréciót kölcsönöz az érintettek számára. A fehérneműhöz hasonló kialakítás nagymértékben segíti az eszközhasználat elfogadását. Magyarországon a **TENA *Pants* termékcsalád 3** - méretarányosan növekvő - vizeletfelszívó képességű **termékváltozata** érhető el a támogatott rendszerben: **Normal**-legkisebb, **Plus**-közepes, **Extra**-nagy.


A **TENA *Pants Plus* nedvszívó kapacitása 1843 ml**, a betegek testi, pszichés és társas mivoltából adódóan kiegyensúlyozott és jó megfelelést adó anatómiailag formázott, magas effektív teljesítményű inkontinencia fehérnemű típusú pelenkanadrág. **Külső és belső szerkezete**, anyagösszetétele védelmet nyújt a vizeletinkontinenciában szokványos kellemetlen és zavaró – túlcsoordulásos, illesztési hiba eredetű, stb. - **vizeletszivárgás és szagok ellen**.

A termék összeségében a rendszeres és tartós önálló alkalmazással együtt járó szakmai és betegoldali igényeknek kiemelkedő megfelelést nyújtó, kiváló nedvszívó és folyadékmegkötő teljesítményű inkontinencia fehérnemű típusú pelenkanadrág. Használata a biztonságos, ergonomikus és komfortos mindennapi felhasználás egyedi kombinációját nyújtja a betegek számára.



A TENA Pants Plus inkontinencia pelenkák főbb szerkezeti és funkcionális jellemzői:

- 1) **Bőrbarát textilszerű felső réteg:** A vizeletet a nedvszívó rétegbe vezeti, és szárazon tartja a bőrt.
- 2) **Légáteresztő külső borítás:** Bőrbarát, mivel hagyja lélegezni a bőrt, így elkerülhetőek a bőrirritációk.
- 3) **Dupla cellulóz mag:** A felső mag a beérkező folyadékot gyorsan elvezeti, az alsó mag biztonságosan megtartja.
- 4) **Feel Dry™ réteg:** Elősegíti a gyors folyadék-elvezetést, ezáltal szárazon tartja a pelenka bőrrel érintkező felületét, így óvja a bőrt a nedvességtől.
- 5) **Körkörös derékgumírozás és hosszanti vízhatlan védőgát:** Szivárgásmentességet, kényelmes viseletet biztosítanak.
- 6) **Body-Close Fit™:** Pontos illeszkedést és diszkrét viseletet biztosít a testhezálló forma.
- 7) **Méret jelölése a terméken:** A termék a csomagolásból kivéve is könnyen beazonosítható.
- 8) **Szagsemlegesítő rendszer:** Savas pH-jának köszönhetően meggátolja a baktériumok szaporodását, ezáltal a kellemetlen szagok kialakulását.
- 9) **Anatómiailag formázott:** A test anatómiájának megfelelően kialakított pelenka forma jó illeszkedést biztosít, így biztonságot és kényelemérzetet nyújt.

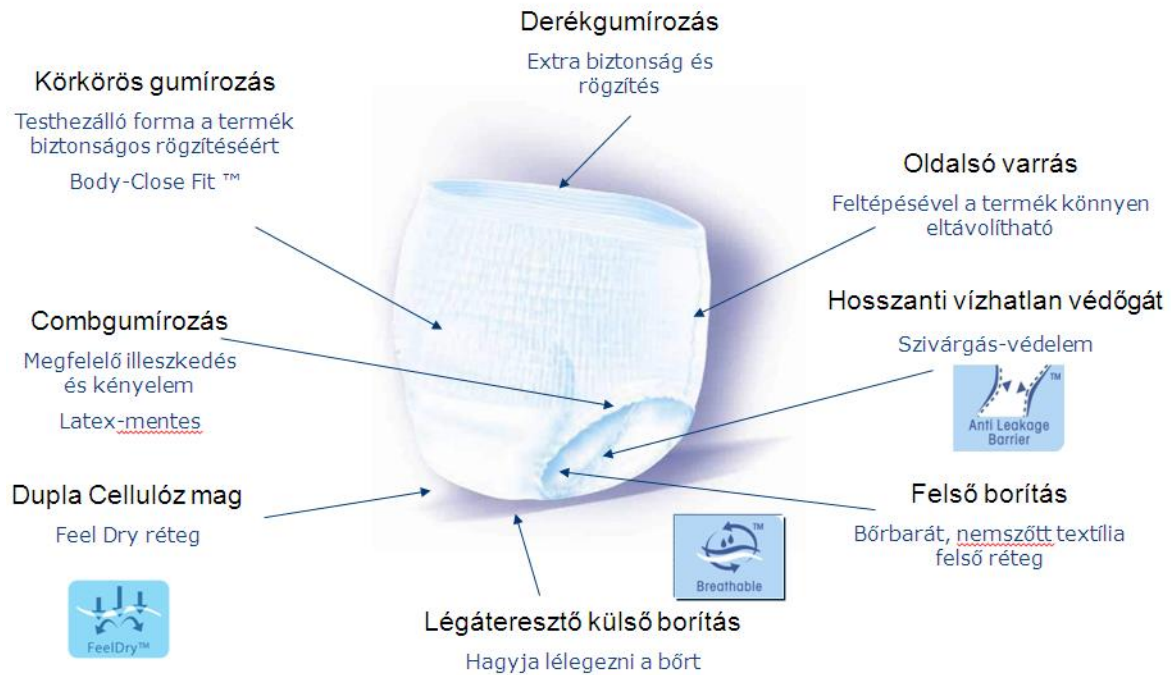

A TENA *Pants* termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek. A termék gyárja, Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden) gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A termékek szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év. A TENA *Pants* Plus S méretben kapható.

Alapanyag százalékos összetétele:

Cellulóz (62,05%), Szuperabszorbens (22,48%), Borítóanyag (PE, nemszőtt textília) (9,06%), Egyéb (Ragasztóanyag, rögzítő szalagok, elasztikus szálak: 6,41%)


FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

TENA *Pants*

A TENA *Pants* egyszerhasználatos termék.

Felhelyezés: A nadrág rugalmas gumírozásának köszönhetően felhúzható, mint egy alsónemű.

1. Az elhasznált terméket távolítsa el, tisztítsa és ápolja a bőrt bőrápoló termékekkel.
2. Nyissa ki a TENA *Pants* csomagolását, vegye ki és hajtsa szét a pelenkanadrágot.
3. Kezeinket a derékrészbe bújtatva a gumírozott részeket szélteben kicsit nyújtsuk meg, hogy lazábbá válhassanak.
4. Tartsuk a terméket magunk elé úgy, hogy a lábkivágás keskenyebb része kerüljön előre.
5. A terméket magunk elé tartva lépünk be az egyik majd a másik lábunkkal a lábkivágásokba.
6. Húzzuk fel a terméket, úgy, mint egy alsóneműt, a láb közti részt igazítsuk el, hogy kényelmes viseletet érjünk el.

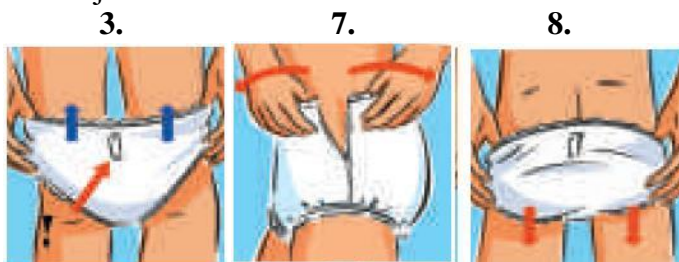

Levétel:

1. Tépje fel a nadrág két oldalán az illesztéseket és egy határozott mozdulattal húzza ki a lábai közül.
2. Eltávolítás után a pelenkát hajtsa össze és a terméken található ragasztószalag segítségével rögzítse, majd dobja ki.
3. A beteg bőrét tisztítsa és a megbízható bőrvédő hatás elérése érdekében javasoljuk a TENA Bőrápolók használatát a következő termék felhelyezése előtt.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek tudja bejelenteni az amd.vig@ogyei.gov.hu címen.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. További információk: www.tena.hu, INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Használati útmutató 2021.07.15.

Gyártó: Essity Hygiene and Health AB
SE-405 03 Göteborg, Sweden

Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.