

# TENA BED SECURE ZONE PLUS BETEGALÁTÉT – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékek:

- TENA Bed Secure Zone Plus betegalátét 60x40 cm
- TENA Bed Secure Zone Plus betegalátét 60x60 cm
- TENA Bed Secure Zone Plus betegalátét 60x90 cm

Puha antidecubitus betegalátét ágyvédelemre.

## Gyógyászati segédeszköz.

**A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

Vegye ki az ágyvédőt a csomagból, és hajtsa szét. Helyezze a puha felével felfelé az ágyra/ kerekesszékre úgy, hogy az ápolt csípője alá essen, az lehetőleg középen helyezkedjen el. Szennyeződés esetén cserélje! A használt ágyvédőt mindig a szemetesbe dobja!

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja. A termék gyermekektől távol tartandó.



Dermatológiailag  
tesztelt

[www.tena.hu](http://www.tena.hu)

Forgalmazó:

**Essity Hungary Kft.**

1021 Budapest, Budakeszi út 51.

INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Gyártó:

**Essity Hygiene and Health AB**

SE-405 03 Göteborg, Sweden